




## **CT LUCIA**

Instrucciones de uso



Seeing beyond

# Preparación de CT LUCIA 621P/621PY y CT LUCIA 221P

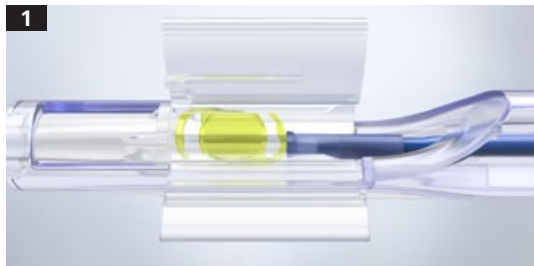


1 Comprobar el centrado de la lente y colocar la lente en la cámara intraocular.



2 Recubrir la lente y el extremo del émbolo azul con **abundante** OVD. Evitar tocar la lente y la punta del émbolo azul.




3 Cerrar la tapa de la cámara intraocular. **IMPORTANTE:** dejar la lente en esta posición hasta que el cirujano la inserte en el ojo.

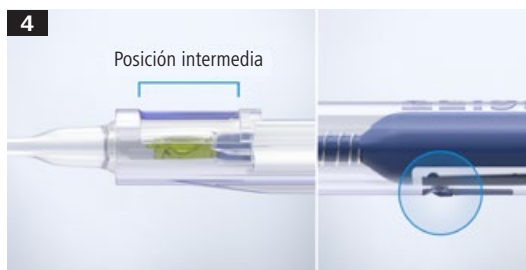

4 Colocar la lente en la posición intermedia. Empujar levemente el émbolo hacia adelante hasta que oiga "clic".

**IMPORTANTE:** debe implantarse la lente de inmediato.

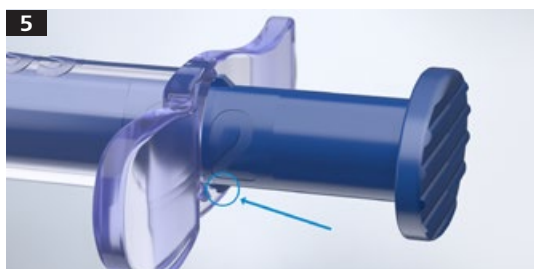

5 Empujar la lente poco a poco hasta que salga por completo del inyector. Si la lente no ha sido expulsada del todo, aplicar más presión hasta que salga por completo.

6 Posicionar cuidadosamente la lente en el saco capsular.

7 Desechar el dispositivo. No reutilizar el sistema de aplicación de la lente.

CE 0297

CT LUCIA 221P  
CT LUCIA 621P / 621PY



**Carl Zeiss Meditec AG**  
Goeschwitzer Strasse 51-52  
07745 Jena  
Alemania  
[www.zeiss.com/lucia](http://www.zeiss.com/lucia)  
[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)

ES\_32\_022\_007811 Impreso en Alemania. CZ-XII/2020 Edición internacional: en venta solo en países seleccionados. El contenido de este folleto puede diferir del estado actual de homologación del producto o del servicio en su país. Contacte con su representante regional para obtener más información. Reservado el derecho a realizar modificaciones en el diseño o el volumen de suministro por desarrollos técnicos. CT LUCIA es una marca comercial o marca comercial registrada de Carl Zeiss Meditec AG o de otras empresas del Grupo ZEISS de Alemania y/o de otros países. © Carl Zeiss Meditec AG, 2020. Reservados todos los derechos.