


BLUEMIXS 180 Injektor von ZEISS


Gebrauchsanweisung




Seeing beyond

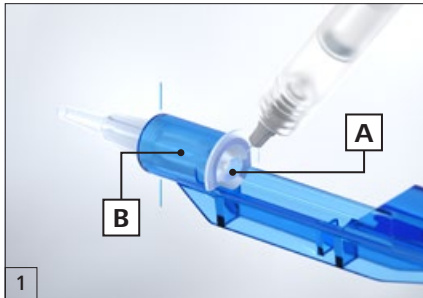


Die Kanüle der Spritze mit dem Viskoelastikum (OVD) in den hinteren Teil der Injektorspitze (A) einführen und Viskoelastikum in die Spitze injizieren, bis diese bis zum vorderen Ende des blauen Injektors (B) gefüllt ist. Carl Zeiss Meditec empfiehlt die Verwendung von Carl Zeiss Meditec Viskoelastika.

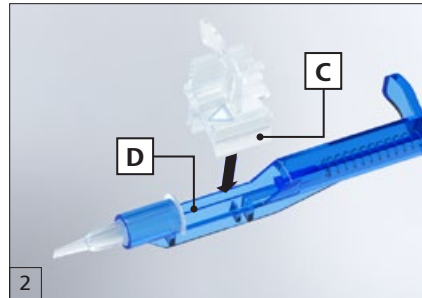


Sicherstellen, dass der Kolben vollständig zurückgezogen ist. Die Ladekammer (C) mit der darin enthaltenen Linse in den BLUEMIXS 180 Injektor (D) einlegen.

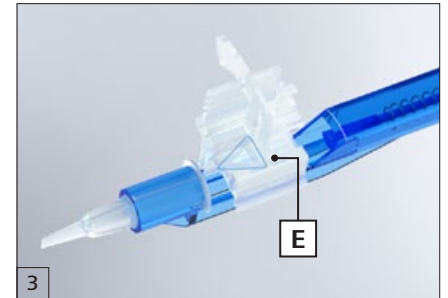


Das Dreieck auf der Kappe (E) sollte zur Injektorspitze zeigen.

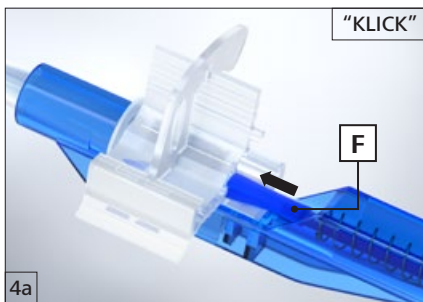


Den Kolben in Richtung des Sicherheitskappenstifts (F) bis zur mittleren Stopp-Position sanft eindrücken, bis ein leichtes Klicken hörbar ist. Das Eindrücken des Kolbens bis zur mittleren Stopp-Position ist zwingend erforderlich, damit die Linse in der gewünschten Position bleibt und die Sicherheitskappe abgenommen werden kann.

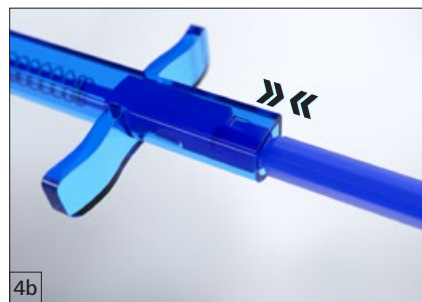


Die Einkerbungen am Kolben sind an der Rückseite des Injektorkörpers ausgerichtet.

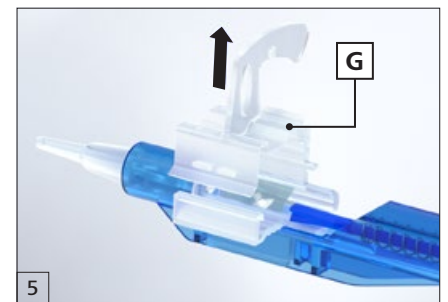

Sicherheitskappe (G) vertikal abnehmen. Per Sicht die korrekte Position der Linse überprüfen.

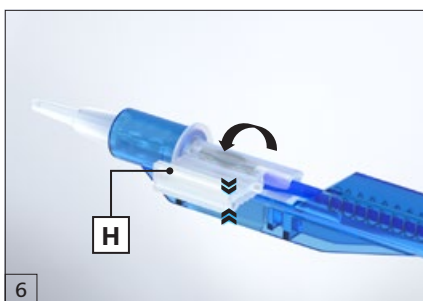

Anschließend die Ladekammer (H) schließen. Die IOL ist jetzt bereit für die Injektion. Den Kolben hineindrücken. Sicherstellen, dass das blaue Silikonkissen sich nicht am Ende des Sicherheitskappenstifts vorbeischiebt, um ein Verrutschen der Linse zu verhindern. Wenn ein übermäßig starker Widerstand beim Hineindrücken der Linse zu spüren ist, überprüfen Sie, ob das Silikonkissen komplett von der Linse getrennt ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die hintere Haptik ordnungsgemäß vor dem Kissen platziert ist.

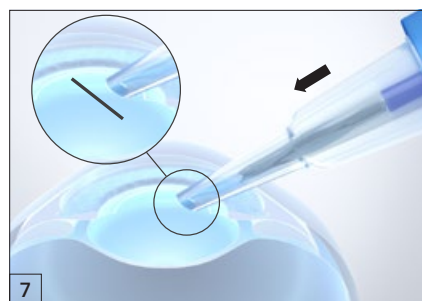

- Die Injektorspitze mit der schrägen Seite nach unten zeigend durch die Inzision ins Auge einführen.
- Die Intraokularlinse in den Kapselsack injizieren.
- Den Injektor aus der Inzision ziehen.
- Das Viskoelastikum gründlich aus dem Auge entfernen. Die Injektion ist jetzt abgeschlossen.

CE 0297

BLUEMIXS 180 Injektor



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Deutschland
www.zeiss.com/injectors

de-INT_32_025_01811 Gedruckt in Deutschland. CZ-XII/2021 Internationale Ausgabe. Nur für den Vertrieb in ausgewählten Ländern.
Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes oder des Serviceangebots in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen Vertretungen. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten. BLUEMIXS ist eine Marke oder eingetragene Marke der Carl Zeiss Meditec AG oder anderer Unternehmen der ZEISS Gruppe in Deutschland und / oder anderen Ländern.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2021. Alle Rechte vorbehalten.