



Injektorsatz SKYJET

Gebrauchsanweisung für vorgeladene
CT ASPHINA 603P und CT SPHERIS 203P



Seeing beyond

Injektorsatz SKYJET

Vorbereiten der vorgeladenen CT ASPHINA® 603P und CT SPHERIS® 203P



Überprüfen Sie, dass der Stempel vollständig zurückgezogen ist und von den Sicherheitsklammern gehalten wird.



Führen Sie die Kassette entlang der Pfeilrichtung in den Injektor ein. Drücken Sie die Kassette ganz ein, bis sie hörbar einrastet.



Halten Sie die Sollbruchlasche zwischen Daumen und Zeigefinger. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. Die Lasche bricht und gibt die Linse frei.



Injizieren Sie das Viskoelastikum in die hintere Öffnung des Injektors. Füllen Sie den Injektorkanal bis zur 3-mm-Markierung.



Ziehen Sie den Stempel vorsichtig aus den Sicherheitsklammern und drücken Sie ihn dann langsam wieder ein, um die Linse in den Injektionskanal zu schieben.



Führen Sie die Spitze des Injektors mit der angeschrägten Öffnung nach unten in die Inzision ein und injizieren Sie die Linse in den Kapselsack.



0459
SKYJET
CT ASPHINA 603P
CT SPHERIS 203P



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena
Germany
www.zeiss.com/injectors



Carl Zeiss Meditec SAS
27 Avenue Paul Langevin
17180 Périgny, Frankreich
Postanschrift:
Avenue Paul Langevin, BP5
17053 La Rochelle – Cedex 9
Frankreich

DE_32_022_00271 Gedruckt in Deutschland. CZ-/2020 Internationale Ausgabe. Nur für den Vertrieb in ausgewählten Ländern. Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes oder des Serviceangebots in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen Vertretungen. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten. CT ASPHINA, CT SPHERIS und SKYJET sind Marken oder eingetragene Marken der Carl Zeiss Meditec AG oder anderer Unternehmen der ZEISS Gruppe in Deutschland und / oder anderen Ländern. © Carl Zeiss Meditec AG, 2020. Alle Rechte vorbehalten.