

VISCOJECT-BIO 1.8 Injektorset


Gebrauchsanweisung für nicht-vorgeladene MICS-IOL




Seeing beyond




1 Geben Sie eine kleine Menge des Viskoelastikums* in die Spitze der Kartusche. Füllen Sie Viskoelastikum in beide Seiten des Führungskanals. Berühren Sie die Spitze der Kartusche nicht mit den Fingern.

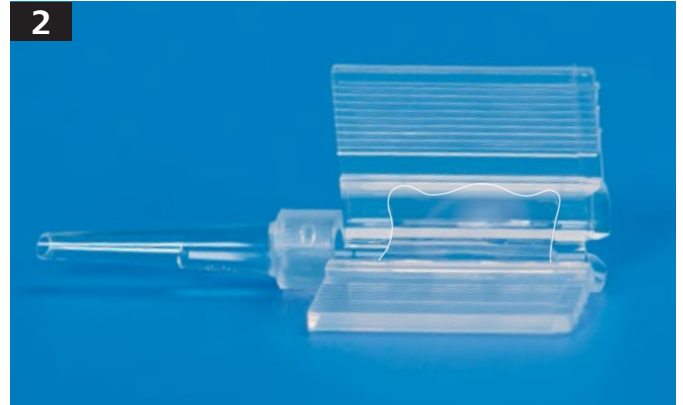

2 Legen Sie die IOL mittig in die geöffnete Kartusche. Drücken Sie die Kanten der Optik nach unten, um sicherzustellen, dass die Haptik unter den Leisten der Kartusche liegt.

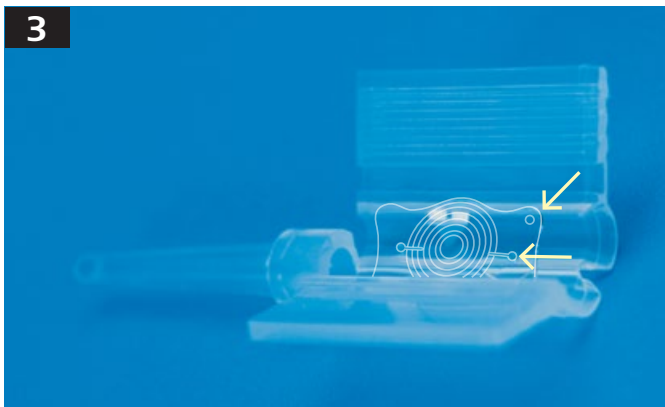

3 Achten Sie bei torischen und multifokalen IOLs auf die Orientierungslöcher und die Meridianmarkierungen.

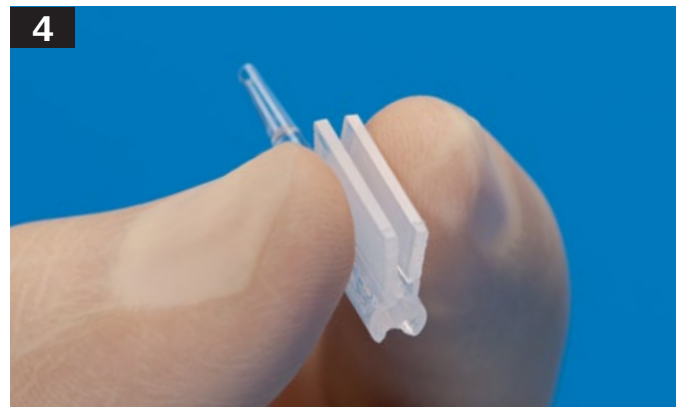

4 Falten Sie die Kartusche zusammen. Halten Sie die IOL dabei mit der Faltzange in ihrer Position. Die Kartusche ist verschlossen, wenn Sie ein Klicken hören.



5 Setzen Sie die Kartusche in den Injektor ein und schieben Sie sie bis zum Anschlag vor. Die Linse ist jetzt bereit für die Implantation.



6 Positionieren Sie die abgeschrägte Kante nach unten und drücken Sie vorsichtig auf den Kolben, um die IOL zu injizieren.

*Carl Zeiss Meditec empfiehlt die Verwendung von ZEISS Viskoelastika.



0482

VISCOJECT-Bio 1.8 Injector Set



Medical AG

Dornierstrasse 11

9423 Altenrhein

Schweiz

www.zeiss.com/injectors

<https://zeiss.com/med/contacts>

de-0US_32_022_01781 CZ-IV/2024 Internationale Ausgabe: Nur für den Vertrieb in ausgewählten Ländern.
Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes oder des Serviceangebots in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen Vertretungen. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten. VISCOJECT ist eine Marke von Mediceal.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2024. Alle Rechte vorbehalten.