

VISCOJECT-BIO 1.8 Injektorset


Gebrauchsanweisung für nicht-vorgeladene MICS-IOL



Seeing beyond




1 Geben Sie eine kleine Menge des Viskoelastikums* in die Spitze der Kartusche. Füllen Sie Viskoelastikum in beide Seiten des Führungskanals. Berühren Sie die Spitze der Kartusche nicht mit den Fingern.

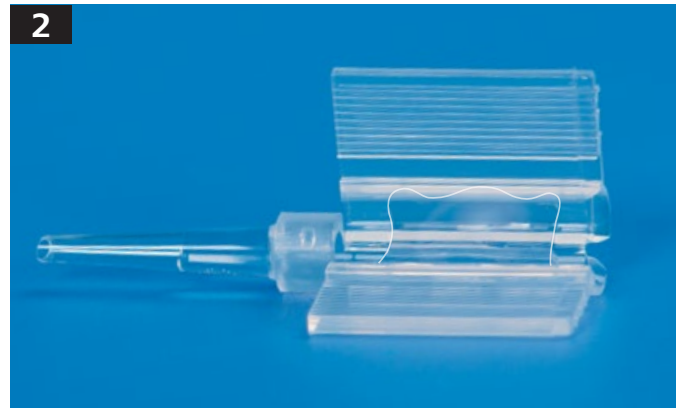

2 Legen Sie die IOL mittig in die geöffnete Kartusche. Drücken Sie die Kanten der Optik nach unten, um sicherzustellen, dass die Haptik unter den Leisten der Kartusche liegt.



3 Achten Sie bei torischen und multifokalen IOLs auf die Orientierungslöcher und die Meridianmarkierungen.

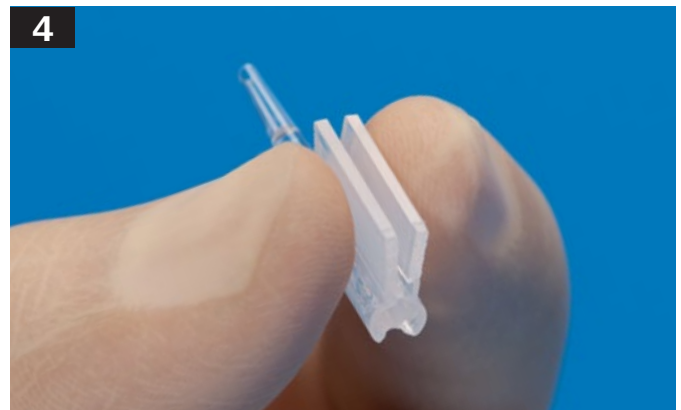

4 Falten Sie die Kartusche zusammen. Halten Sie die IOL dabei mit der Faltzange in ihrer Position. Die Kartusche ist verschlossen, wenn Sie ein Klicken hören.



5 Setzen Sie die Kartusche in den Injektor ein und schieben Sie sie bis zum Anschlag vor. Die Linse ist jetzt bereit für die Implantation.



6 Positionieren Sie die abgeschrägte Kante nach unten und drücken Sie vorsichtig auf den Kolben, um die IOL zu injizieren.

*Carl Zeiss Meditec empfiehlt die Verwendung von ZEISS Viskoelastika.



0482

VISCOJECT-Bio 1.8 Injector Set



Medicel AG

Dornierstrasse 11

9423 Altenrhein

Schweiz

www.zeiss.com/injectors

<https://zeiss.com/med/contacts>