


AT ELANA 841P

Istruzioni d'uso




Seeing beyond

Preparazione

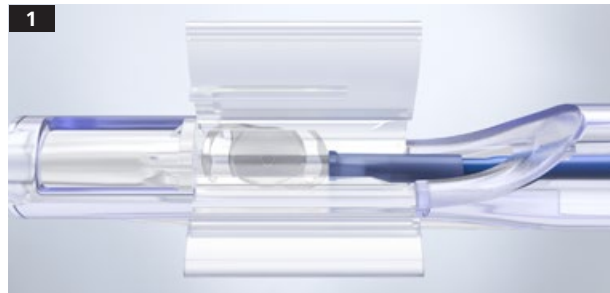

Verificare che la lente intraoculare sia centrale e ben posizionata nel caricatore.

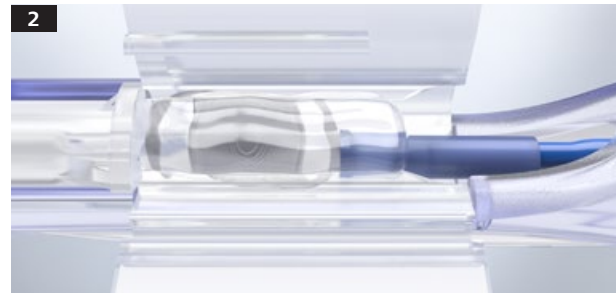


Coprire l'intera lente e l'estremità blu dello stantuffo con una **generosa** quantità di viscoelastico. Evitare il contatto con la lente e l'estremità blu dello stantuffo.




Chiudere il coperchio del caricatore.

IMPORTANTE: lasciare la lente in questa posizione finché il chirurgo non è pronto per l'impianto.

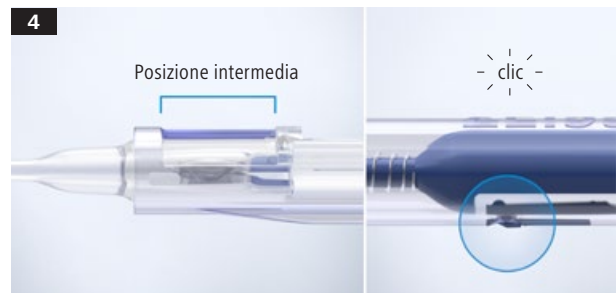


Portare la lente in posizione intermedia. Premere delicatamente lo stantuffo in avanti fino ad udire un "clic".


IMPORTANTE: la lente deve essere impiantata immediatamente.

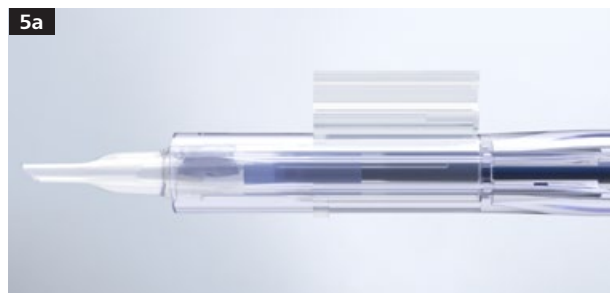

Iniezione: assicurarsi che le ali del caricatore siano rivolte verso l'alto.

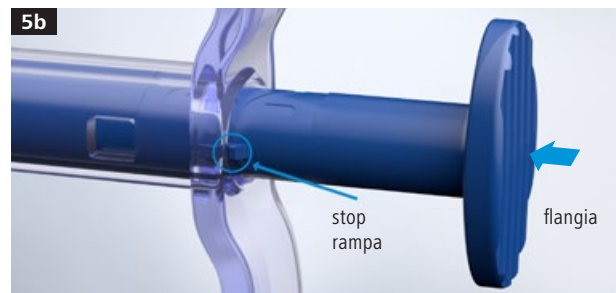

Fare avanzare lentamente la lente finché viene rilasciata dall'iniettore. Se l'impianto è incompleto, esercitare una maggiore pressione sulla flangia per rilasciare la lente. **Funzione di assistenza:** lo stop rampa presente sul retro dell'iniettore impedisce una corsa eccessiva dello stantuffo nella fase conclusiva dell'impianto.

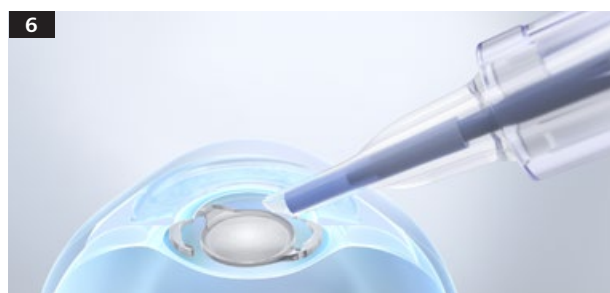

Posizionare accuratamente la lente nel sacco capsulare.



Gettare il dispositivo. Non riutilizzare il sistema di iniezione.

CE 0297

AT ELANA 841P



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Germania

www.zeiss.com/elana

www.zeiss.com/med/contacts

it-INT_32_012_00511 Stampato in Germania. CZ-1/2022 Edizione internazionale: esclusivamente per la vendita nei paesi selezionati. Il contenuto dell'opuscolo può differire dall'attuale stato di omologazione del prodotto o del servizio nel proprio paese. Contattare il rappresentante locale per ulteriori informazioni. Riserva di modifiche nell'esecuzione e nel volume della fornitura nell'ambito dell'ulteriore sviluppo tecnico. AT ELANA 841P è un marchio o un marchio registrato di Carl Zeiss Meditec AG o di altre aziende del Gruppo ZEISS in Germania e / o in altri paesi.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2022. Tutti i diritti riservati.