


AT ELANA 841P

Istruzioni d'uso




Seeing beyond

Preparazione

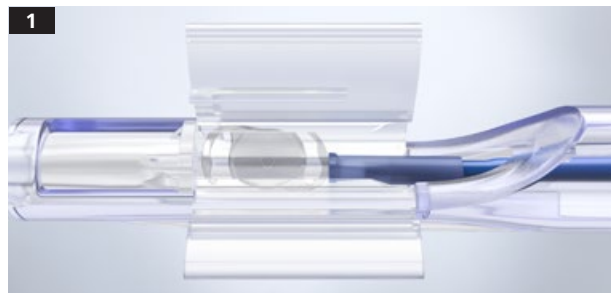

Verificare che la lente intraoculare sia centrale e ben posizionata nel caricatore.

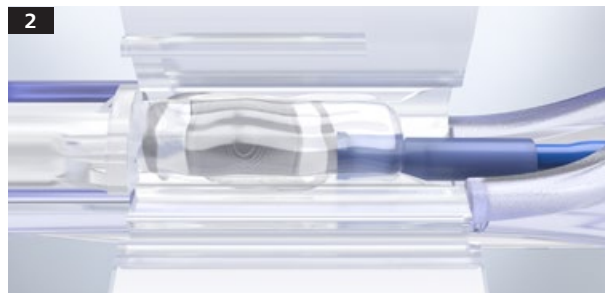


Coprire l'intera lente e l'estremità blu dello stantuffo con una **generosa** quantità di viscoelastico. Evitare il contatto con la lente e l'estremità blu dello stantuffo.




Chiudere il coperchio del caricatore.

IMPORTANTE: lasciare la lente in questa posizione finché il chirurgo non è pronto per l'impianto.

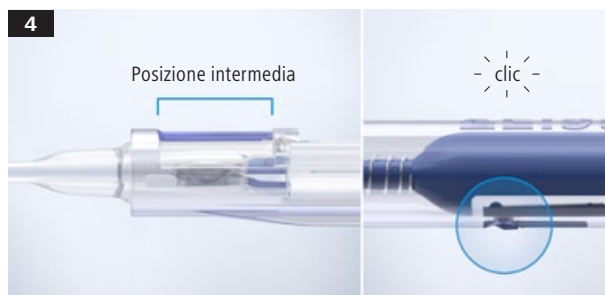


Portare la lente in posizione intermedia. Premere delicatamente lo stantuffo in avanti fino ad udire un "clic".


IMPORTANTE: la lente deve essere impiantata immediatamente.

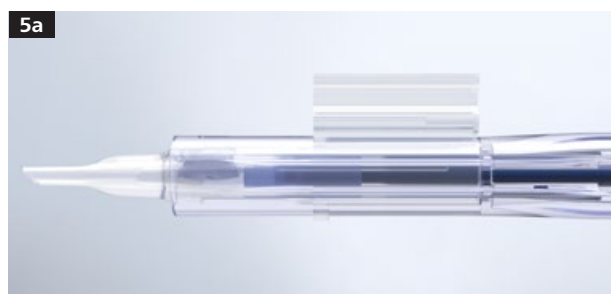

Iniezione: assicurarsi che le ali del caricatore siano rivolte verso l'alto.

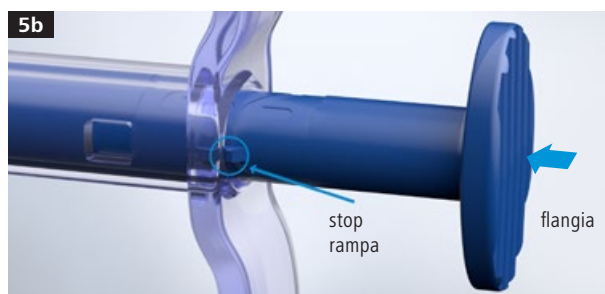

Fare avanzare lentamente la lente finché viene rilasciata dall'iniettore. Se l'impianto è incompleto, esercitare una maggiore pressione sulla flangia per rilasciare la lente. **Funzione di assistenza:** lo stop rampa presente sul retro dell'iniettore impedisce una corsa eccessiva dello stantuffo nella fase conclusiva dell'impianto.

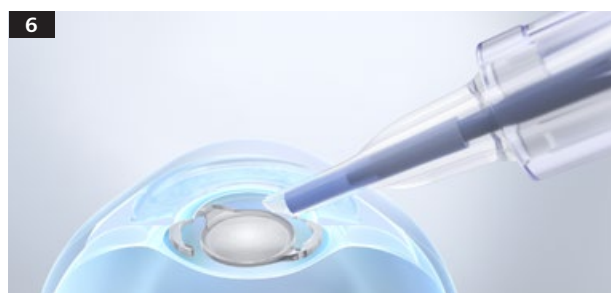

Posizionare accuratamente la lente nel sacco capsulare.

7

Gettare il dispositivo. Non riutilizzare il sistema di iniezione.



0297

AT ELANA 841P



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Germania

www.zeiss.com/elana

www.zeiss.com/med/contacts

it-INT_32_012_00511 Stampato in Germania. CZ-I/2022 Edizione internazionale: esclusivamente per la vendita nei paesi selezionati. Il contenuto dell'opuscolo può differire dall'attuale stato di omologazione del prodotto o del servizio nel proprio paese. Contattare il rappresentante locale per ulteriori informazioni. Riserva di modifiche nell'esecuzione e nel volume della fornitura nell'ambito dell'ulteriore sviluppo tecnico. AT ELANA 841P è un marchio o un marchio registrato di Carl Zeiss Meditec AG o di altre aziende del Gruppo ZEISS in Germania e / o in altri paesi. © Carl Zeiss Meditec AG, 2022. Tutti i diritti riservati.