


AT ELANA 841P

Instructions de manipulation




Seeing beyond

Étapes préparatoires

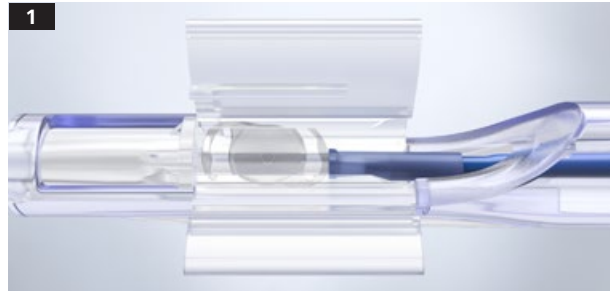

Vérifier que la lentille soit centrée et stable dans la chambre de la LIO.

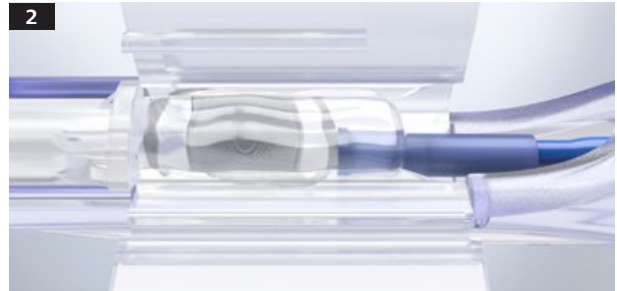


Recouvrir toute la lentille et l'extrémité bleue du piston avec une **généreuse** quantité d'OVD. Évitez de toucher la lentille et l'extrémité bleue du piston.

Étapes d'implantation




Fermer l'opercule de la chambre de la LIO.

IMPORTANT : laisser la lentille dans cette position jusqu'à ce que le chirurgien soit prêt à l'insérer dans l'œil.

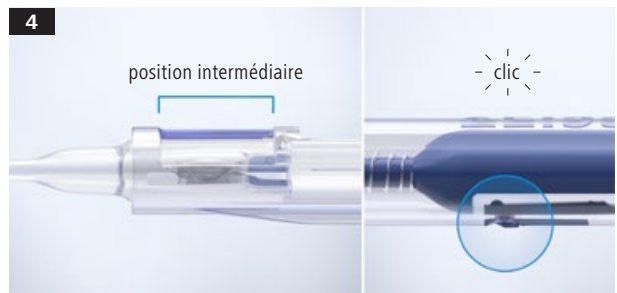


Avancer la lentille en position intermédiaire. Appuyer doucement sur le piston vers l'avant jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre.


IMPORTANT : La lentille doit être implantée immédiatement.

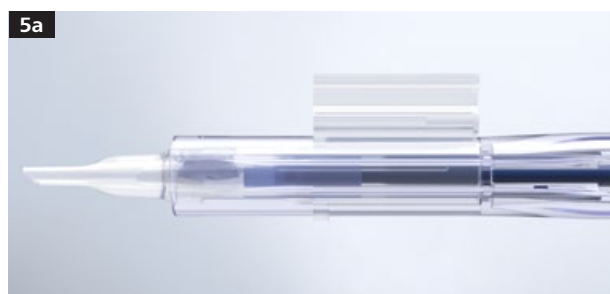

Injection : S'assurer que les ailes de la chambre de chargement sont orientées vers le haut.

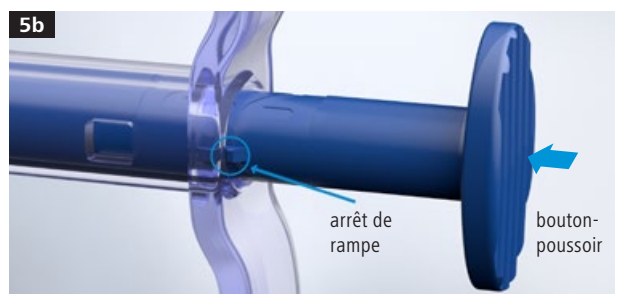

Faire avancer lentement la lentille jusqu'à ce qu'elle soit sortie de l'injecteur. Si elle ne sort pas complètement, exercer une pression supplémentaire au niveau de la bride de pouce pour libérer la lentille. **Fonction d'assistance** : L'arrêt de rampe situé à l'arrière de l'injecteur permet de contrôler la course excessive du piston à la fin de l'administration de la LIO.

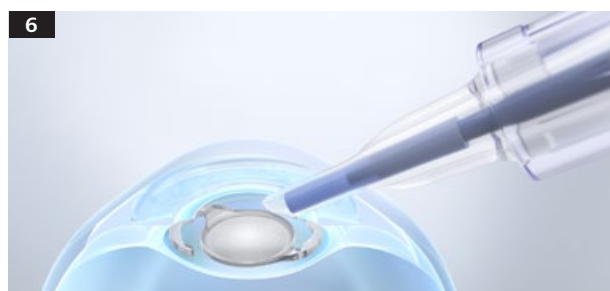

Positionner la lentille avec précaution dans le sac capsulaire.



Éliminer le dispositif. Ne pas réutiliser le système d'insertion.



AT ELANA 841P



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Allemagne
www.zeiss.com/elana
www.zeiss.com/med/contacts