



**Iniettore ACCUJECT 3.0-1P con
CT SPHERIS 204 & CT ASPHINA 404 di ZEISS
ad elevato range diottrico**

Istruzioni per il corretto utilizzo



We make it visible.


L'iniettore ACCUJECT™ 3.0-1P è compatibile con CT SPHERIS® 204 di ZEISS da +31.0 a +45.0 D e con CT ASPHINA® 404 di ZEISS da +31.0 a +42.0 D



1
Iniettare il viscoelastico nella punta dell'iniettore e lungo il canale della cartuccia.



2
Posizionare la lente intraoculare al centro della cartuccia aperta. Utilizzare una pinzetta per piegare IOL al fine di premere verso il basso i bordi dell'ottica ed assicurare così che l'ottica e le anse siano posizionate sotto le sporgenze della cartuccia.

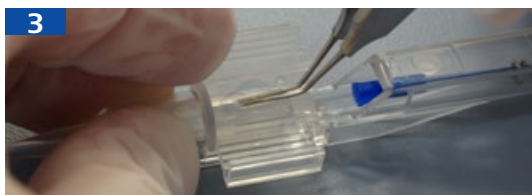

3
Mentre si chiude la cartuccia, mantenere la lente in posizione utilizzando la pinzetta. Fare attenzione che le anse non scivolino fuori dalle scanalature della cartuccia.



4
Fare avanzare lo stantuffo per spostare in avanti la lente ed assicurarsi che quest'ultima si muova liberamente.



5
Per controllare il rilascio della lente dalla punta, rallentare il movimento dello stantuffo quando la parte ottica della lente raggiunge l'estremità smussata della punta.



0297 CT ASPHINA 404
CT SPHERIS 204



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Str. 51–52

07745 Jena

Germania

www.meditec.zeiss.com/iol

www.meditec.zeiss.com/contacts

IT_32_022_00101

Il contenuto dell'opuscolo può differire dall'attuale stato di omologazione del prodotto nel proprio paese. Per ulteriori informazioni rivolgersi al rappresentante locale. Riserva di modifiche nell'esecuzione e nel volume della fornitura nell'ambito dell'ulteriore sviluppo tecnico. CT ASPHINA e CT SPHERIS sono marchi registrati di Carl Zeiss Meditec. ACCUJECT è un marchio di Meditel (CE 0482). Stampato su carta sbiancata senza cloro.
© 2014 by Carl Zeiss Meditec AG. Tutti i diritti riservati.