




CT LUCIA

Instrucciones de uso



Seeing beyond

Preparación de CT LUCIA 621P/621PY y CT LUCIA 221P

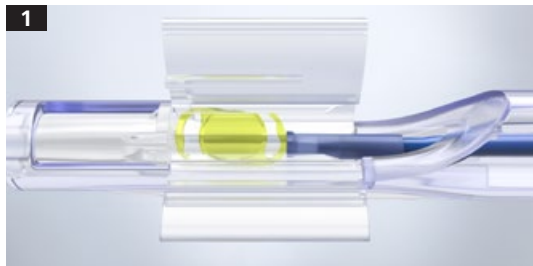


Comprobar el centrado de la lente y colocar la lente en la cámara intraocular.



Recubrir la lente y el extremo del émbolo azul con **abundante** OVD. Evitar tocar la lente y la punta del émbolo azul.




Cerrar la tapa de la cámara intraocular. **IMPORTANTE:** dejar la lente en esta posición hasta que el cirujano la inserte en el ojo.

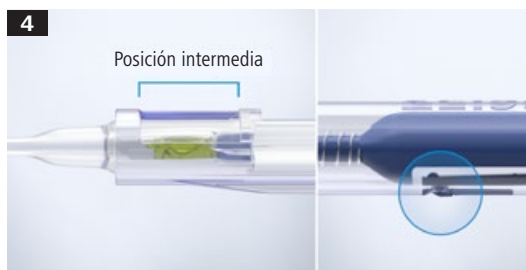

Colocar la lente en la posición intermedia. Empujar levemente el émbolo hacia adelante hasta que oiga "clic".

IMPORTANTE: debe implantarse la lente de inmediato.

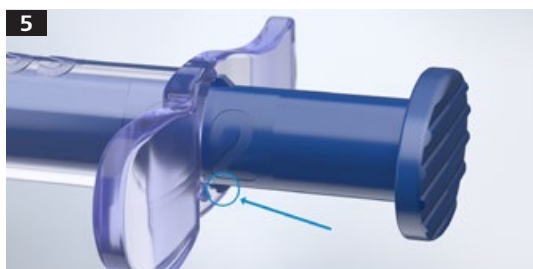

Empujar la lente poco a poco hasta que salga por completo del inyector. Si la lente no ha sido expulsada del todo, aplicar más presión hasta que salga por completo.

6 Posicionar cuidadosamente la lente en el saco capsular.

7 Desechar el dispositivo. No reutilizar el sistema de aplicación de la lente.

CE 0297

CT LUCIA 221P
CT LUCIA 621P / 621PY



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena
Alemania
www.zeiss.com/lucia
www.zeiss.com/med/contacts

ES_32_022_007811 Impreso en Alemania. CZ-XII/2020 Edición internacional: en venta solo en países seleccionados.
El contenido de este folleto puede diferir del estado actual de homologación del producto o del servicio en su país. Contacte con su representante regional para obtener más información. Reservado el derecho a realizar modificaciones en el diseño o el volumen de suministro por desarrollos técnicos. CT LUCIA es una marca comercial o marca comercial registrada de Carl Zeiss Meditec AG o de otras empresas del Grupo ZEISS de Alemania y/o de otros países.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2020. Reservados todos los derechos.