




CT LUCIA

Gebrauchsanweisung



Seeing beyond

Vorbereiten der CT LUCIA 621P/621PY und CT LUCIA 221P

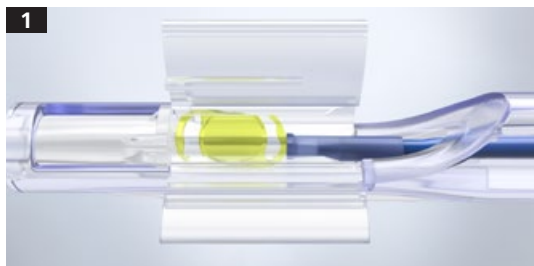


Überprüfen Sie, dass die Linse sicher und mittig in der Ladekammer positioniert ist.



Viskoelastikum **großzügig** auf die gesamte Linse und die blaue Kolbenspitze auftragen. Dabei die Linse und die blaue Kolbenspitze nicht berühren.




Die Flügel der Ladekammer schließen. **WICHTIG:** Die Linse in dieser Position belassen, bis der Chirurg sie in das Auge einbringt.

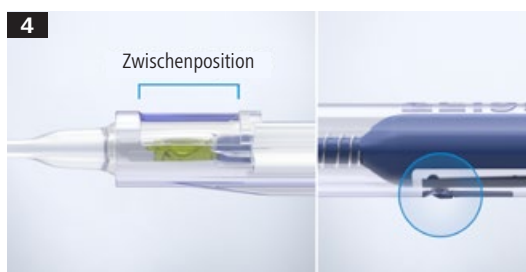

Die Linse in die Zwischenposition vorschieben. Den Kolben sanft eindrücken, bis ein leichtes Klicken hörbar ist.

WICHTIG: Die IOL muss sofort implantiert werden.

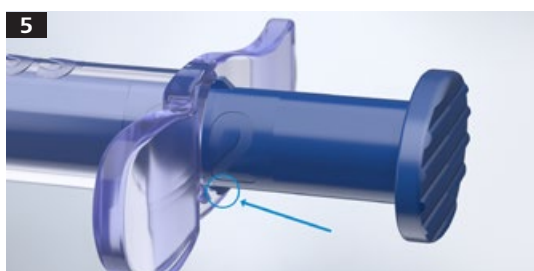

Die Linse langsam vorschieben, bis sie aus dem Injektor ausgetreten ist. Bei unvollständigem Austritt zusätzlichen Druck auf den Druckansatz ausüben, bis die Linse freigegeben wird.

6 Die Linse vorsichtig im Kapselsack positionieren.

7 Die Vorrichtung entsorgen. Das Abgabesystem darf nicht wiederverwendet werden.

CE 0297

CT LUCIA 221P
CT LUCIA 621P / 621PY



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Deutschland
www.zeiss.de/lucia
www.zeiss.de/med/kontakte

DE_32_022_007811 Gedruckt in Deutschland. CZ-XII/2020 Internationale Ausgabe: Nur für den Vertrieb in ausgewählten Ländern. Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes oder des Serviceangebots in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen Vertretungen. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten. CT LUCIA ist eine Marke oder eingetragene Marke der Carl Zeiss Meditec AG oder anderer Unternehmen der ZEISS Gruppe in Deutschland und/ oder anderen Ländern.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2020. Alle Rechte vorbehalten.