


Finishing – Randen, Einschleifen & mehr

Nehmen Sie sich alle Zeit für Ihre Kunden. Den Rest übernehmen wir.

Ihr Kerngeschäft ist die Kundenbetreuung. Um Ihnen die Zeit dafür freizuhalten, bietet unser Leistungsspektrum einen weiteren professionellen Service: Finishing von ZEISS.

Ob Formranden, Einschleifen, Rillen, Polieren oder Bohren – bei Bedarf übernehmen wir diese Arbeiten gern für Sie.

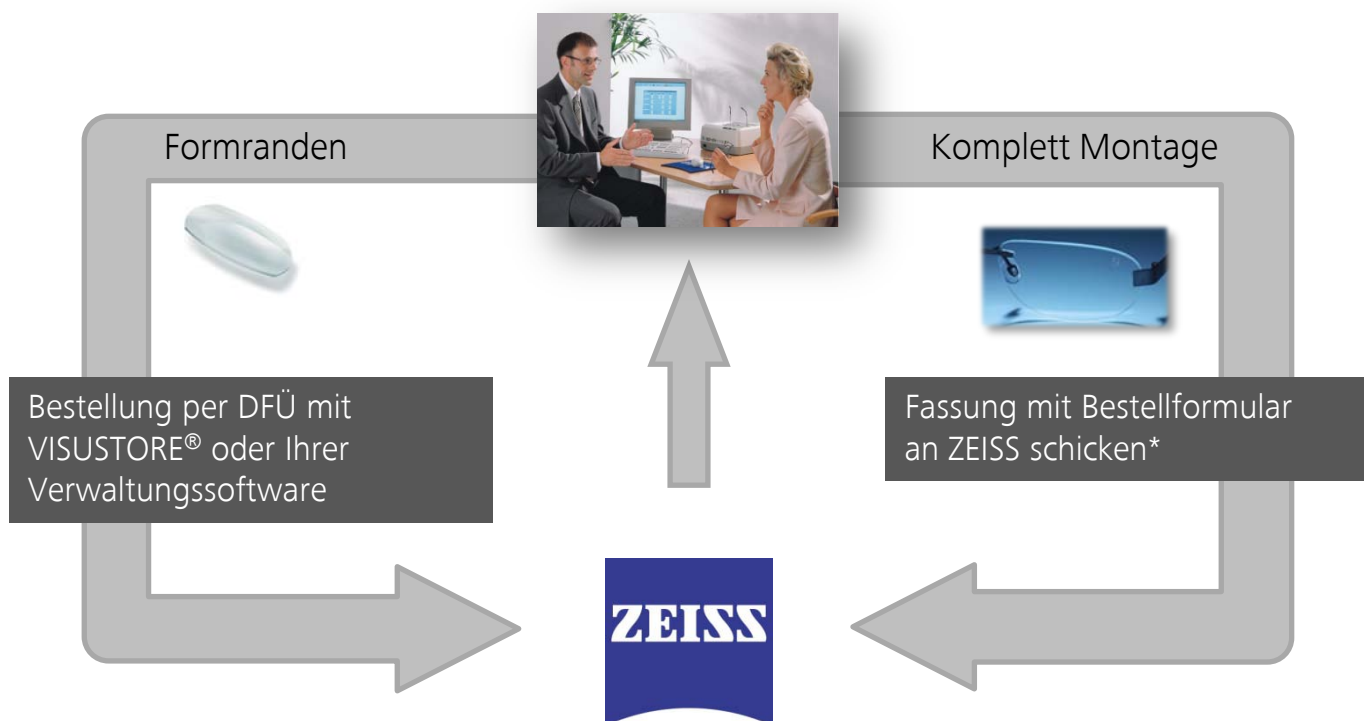

Ihre Vorteile:

- + Mehr Zeit für die Kundenberatung.
- + Keine hohen Investition in Maschinen nötig.
- + Risikofreie Bearbeitung Ihrer hochwertigen ZEISS Brillengläser.
- + Ideal auch als Überbrückung bei Urlaubs- oder Fehlzeiten.

* Falls Sie die Gläser bereits vorab per VISUSTORE® oder DFÜ bestellt haben, geben Sie uns bitte beim Einsenden der Fassung das Bestelldatum sowie die korrekte Kommission an.

Formrandung – so geht's



- 1** Beantragen Sie die Formrandung direkt bei Ihrem ZEISS Gebietsverkaufsleiter.
- 2** Erfassen Sie die Formdaten mit einem geeigneten Tracer. Eine aktuelle Auflistung der unterstützten Tracer finden Sie im VISUSTORE® unter "Tracer hinzufügen".
Bei stärker durchgebogenen Fassungen empfehlen wir die Einzelabtastung oder die Komplett-Montage.
- 3** Bestellen Sie formgerandete Brillengläser mit VISUSTORE® oder mit Ihrer Verwaltungs-Software.

Besondere Hinweise:

- + Für stark durchgebogene Fassungen empfehlen wir die Komplett - Montage.
- + Bitte richten Sie die Fassung vor der Abtastung fachmännisch aus. Berücksichtigen Sie bitte auch, dass bei hohen Wirkungen im Plusbereich die Muschelung ein wichtiger Faktor sein kann.
- + "Bohren" ist nur bei speziell gekennzeichneten und freigegebenen Fassungen möglich (siehe Fassungskatalog im VISUSTORE®).
- + Die Arbeitsschritte "Rillen / Polieren / Bohren" sind nur bei Kunststoffgläsern möglich.
- + Bitte wählen Sie "Rille Standard" für Nylor-Fassungen und "Rille breit" für Metall-Nylor-Fassungen

Komplett-Montage – so geht's

- 1** Füllen Sie das ZEISS Bestellformular für Carl Zeiss Brillengläser aus und markieren Sie „Formrandung – Auftrag mit Fassung“.
- 2** Verpacken Sie Ihre hochwertige Fassung in das Werkstatt-Etui von Carl Zeiss Vision.
- 3** Schicken Sie Fassung und Formular zusammen an Carl Zeiss Vision zur Verglasung
- 4** Sie erhalten Ihre komplett verglaste Fassung im Werkstatt-Etui zurück, das Sie mehrfach als "Pendel-Behälter" nutzen können



Besondere Hinweise:

- + Speziell gekennzeichnete und freigegebene Brillenfassungen müssen nicht mitgeschickt werden – Sie können die Brillengläser einfach per DFÜ in VISUSTORE® bestellen
- + Verglasungszubehör bitte mit schicken.
- + Für herstellerbedingte Mängel an Fassungen können wir keine Haftung übernehmen
- + Weitere spezielle und nicht aufgeführte Positionen erledigen wir gern für Sie auf Anfrage.
- + Besondere Bearbeitungen werden nach Aufwand berechnet.
- + Sie erhalten die Brillen symmetrisch ausgerichtet (soweit möglich) zurück.
- + Falls Sie die Gläser bereits vorab per VISUSTORE® oder DFÜ bestellt haben, geben Sie uns bitte beim Einsenden der Fassung das Bestelldatum sowie die korrekte Kommission an